

おやここ

PARAMOUNT BED

OyaCoco

ファミリーサポートチェア



カンガルーケアを安心して行えるよう、医療機器のチューブが固定できるベルト付きです。

赤ちゃんを抱っこする
お父さん、お母さんの
両腕と後頭部を
U字クッションが支え
初めてのケアをサポートします。

キャスター付で移動させやすく
必要な場所にセッティング
することができます。



バックレストレバー
バックレストの角度を
30度の範囲で調整可能



U字クッション

バックレストに面ファスナーで固定
取り外して清拭消毒可能

チューブ固定ベルト

上下4カ所（面ファスナー固定）
髪の毛が付きにくいタイプを採用

バックレスト

105度～135度でリクライニング

アームレスト

U字クッションのベルトを通して固定

ポケット

座面の隙間に差し込んで取付け
（左右取付け可能）
スマートフォンや手鏡を収納可能

フットレスト

0～90度（15段階）で調整可能
フットレストを上を持ち上げてロック解除
好みの角度に調整可能




「OyaCoco」を設置して カンガルーケアを行う環境を整えましょう

OyaCocoの使い方

1. カンガルーケアを行う場所にチェアを移動します
2. バックレストレバーを引いてバックレストの角度を調整します
3. フットレストの角度を調整します
4. お父さん、お母さんに座ってもらいます
5. 姿勢が整ったら、赤ちゃんを胸の上にのせます
6. 固定ベルトで医療機器のチューブを整えます
7. **カンガルーケアを始めます**

チェア本体とお父さん、お母さんの身体のすき間を
やわらかい素材のU字クッションで埋めるように支えるので、
長時間姿勢がくずれにくく、安定感のある抱っこが可能です。

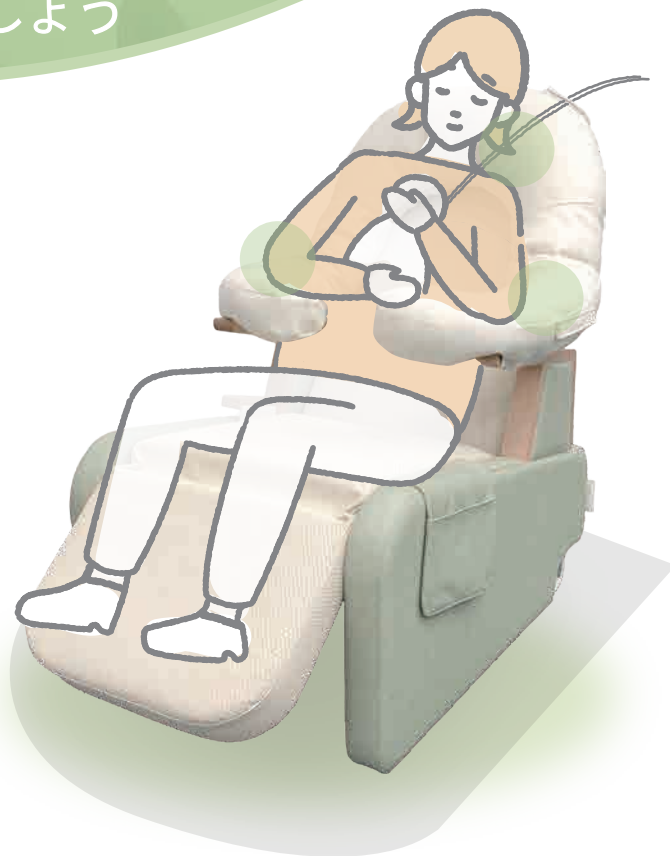

お手入れについて


チェア本体、U字クッション共に耐アルコール、耐次亜塩素酸

U字クッションの取り外し方法

1. 左右のアームレストからアームレストベルトを取り外す
2. バックレスト裏面の面ファスナーをはがす
3. クッションをバックレストから上方向に引き抜く

U字クッションの取り付け方法

1. バックレストベルトをバックレストに取り付ける
2. 左右のアームレストベルトをアームレストに通す
3. クッションの位置を調節してバックレストを裏面の面ファスナーで固定

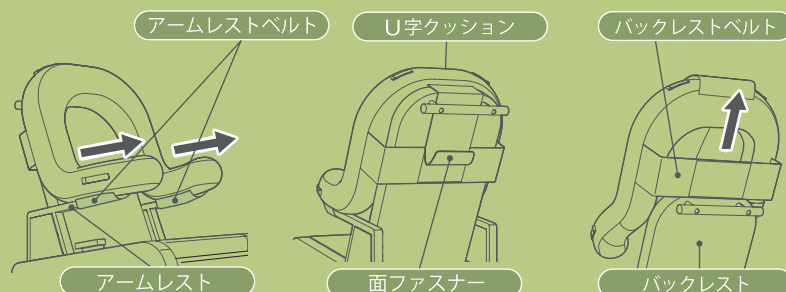

ファミリーサポートチェア OyaCoco (おやここ)

製品コード	外寸法	座面高	最大使用者体重	価格
KD-Z08	幅61×奥行91.6 (91.6~146.5) ×高さ77 (77~99)cm ※U字クッション含む	36.5cm	100kg	オ-ブン価格

チェア本体

■構造部材	座面：金属、合板、天然木 アームレスト：天然木	フットレスト、サイドパネル：合板、天然木 バックレスト：金属、合板
■表面加工	ウレタン樹脂塗装 (天然木)	■表面加工 ウレタン樹脂塗装 (天然木)、メラミン焼付塗装 (鉄)
■張り材	合成皮革	■クッション材 ウレタンフォーム

U字クッション

■外カバー	合成皮革	■中綿	ポリエステル	■内カバー	ポリエステル
-------	------	-----	--------	-------	--------

パラマウントベッド株式会社

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
(03) 3648-1111 (大代) www.paramount.co.jp

チェアのはこび方

1. バックレストをリクライニング前、フットレストを上げる前の状態に戻す
2. グリッパを握り、ステップを踏みながら前部を少し持ち上げる
3. 運び終わったら、ゆっくり前部を下ろす

