

取扱説明書

7F00065700A1

保証書付

KS-160,165,170,175,190,195
KS-125B/C/D/M
KS-145B/C/D/M

ベッドサイドレール


まえがき

- このたびは、ベッドサイドレールをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、ベッドサイドレールを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。
- ベッドサイドレールをご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
 - ベッドサイドレールをお使いになる方ばかりでなく、看護、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
 - この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
 - お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
 - ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

このベッドサイドレールは、ベッドサイドに取付けて使用し、寝ている方のベッドからの転落および、寝具の落下を予防することを目的として作られています。

各部の名称

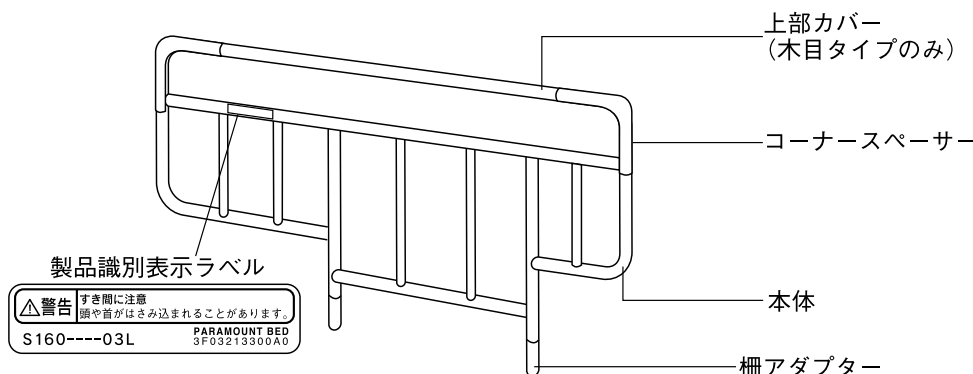

仕 様

スタンダードタイプ		KS-160,165	KS-170,175	KS-190,195
寸法	長さ	964mm		827mm
	高さ	503mm	563mm	503mm
材質	本体	スチール製(電着・粉体塗装)		
	コーナースペーサー	PP(ポリプロピレン)		
	柵アダプター	PP(ポリプロピレン)		


木 目 タ イ プ		KS-125B	KS-125C	KS-125D	KS-125M	KS-145B	KS-145C	KS-145D	KS-145M
色		ビーチ	チェリー	ダークオーク	ミディアムオーク	ビーチ	チェリー	ダークオーク	ミディアムオーク
寸法	長 さ	964mm							
	高 さ	505mm				565mm			
材 質	本 体	スチール製(電着・粉体塗装)							
	コーナースペーサー	PP(ポリプロピレン)							
	柵 ア ダ プ タ ー	PP(ポリプロピレン)							
	上 棧 カ バ ー	耐薬ABS(木目シート貼り)							

安全に使用するための注意事項



- この表示を無視して誤った取扱いをすると、生命にかかわるけがを負う可能性が想定される内容を示しています。

■ サイドレールやボードなどのすき間(↓)に身の一部(特に頭や首)が入らないよう 注意してください

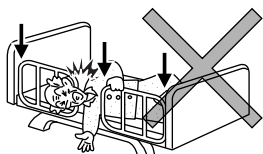

- 頭や首がすき間に入ると抜けなくなり、けがをするおそれがあります。
- 特に体位を自分で保持できない患者さんには十分注意してください。

■ サイドレール使用時もベッドからの転落に十分注意してください

- サイドレールとサイドレール、ベッドのボードとサイドレールのすき間から転落したり、サイドレールの上から身をのりだして転落し、けがをするおそれがあります。

■ サイドレールの中から頭、手や足などを出さないでください



- ベッドの操作時に、操作した部分にはさまれてけがをするおそれがあります。
- ご使用になる方の症状によって、必要に応じて別売りのソフトカバーをお使いください。

■ サイドレールに腰掛けたり、てすり代わりにしないでください

- 体重がかかっている状態でサイドレールが抜けると、転倒してけがをするおそれがあります。
- サイドレールは寝ている方の転落予防、寝具の落下予防を目的としています。立ちあがり時など、支えとしてご使用になる場合は介助バーをお使いください。

■ 柵アダプターを2カ所ともベッドのオプション取付穴に差込んでください

- 1カ所だけを差込んで使用すると、サイドレールが変形し、けがをするおそれがあります。



- この表示を無視して誤った取扱いをすると、人がけがを負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ サイドレールを持ってベッドを動かさないでください

- サイドレールに大きな力がかかり、変形・破損のおそれがあります。

■ 指定以外の製品とは組合わせないでください

- サイドレールを指定以外のベッドやオーバーテーブル等に組合わせて使用すると安定しないだけでなく、サイドレールが不意に外れたり、オーバーテーブルが落下するなど、けがや破損の原因になります。

■ お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや故障の原因となります。

■ スプレータイプの殺虫剤をサイドレールに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがありますので十分ご注意ください。

■ 火気に近づけないでください


- サイドレールの近くでの、ストーブなど熱器具の使用は避けてください。変質、変形、発火等の原因となります。

■ コーナースペーサーまたは柵アダプターが外れた場合は使用しないでください

- けがをするおそれがあります。

使用方法


- サイドレールを図のようにベッド両サイドのオプション取付穴にしっかりと差込んで使用してください。

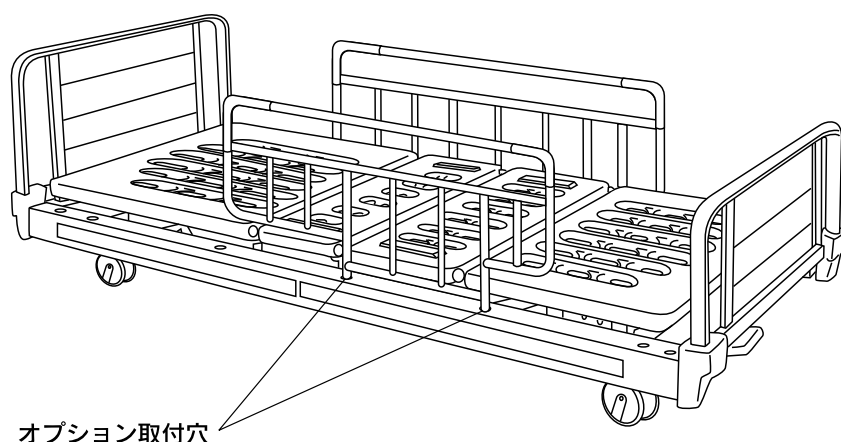

- KS-190/195については、スイングアーム介助バー(KA-095A/B)と組合わせてご使用ください。なお、他のサイドレールとは組合わせないでください。

お手入れ

- 清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で拭き取ってください。
- ※揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリン)は使用しないでください。変色、変質させるおそれがあります。
- 洗浄液を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度に薄めてご使用ください。

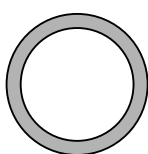

0.05～0.2%塩化ベンザルコニウム液(オスバン液)
0.05～0.2%塩化ベンゼトニウム液(ハイアミン液)
0.05%クロルヘキシジン液(ヒビテン液)



- クレゾールでの清拭は耐薬ABS(木目シート貼り)の部分を変色・変質させるおそれがあります。
- 洗剤、洗浄液を用いたのち水拭きを怠ると樹脂の部分が割れるおそれがあります。

アフターサービスについて

1.保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

故障したときは、お買い上げ販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンターまでご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号(サイドレールのフレームに貼付:表紙参照)
- お買い上げ日
- 破損または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。

ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは、下記の保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3.部品の最低保有年数は

弊社では、製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間を製造打ち切り後6年としております。

4.アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

コールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間:平日9:00~17:20(土・日・祝日・夏季休業・年末年始休業を除く)

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検等の各種サービスを実施する、弊社100%出資の会社です。

保 証 書

品 名		ベッドサイドレール	品 番	KS-160,165,170,175,190,195 KS-125B/C/D/M KS-145B/C/D/M
保証期間		1 年 間	保証対象	本 体
お買い上げ日				
お 客 様	芳 名		販 売 店	
	ご住所	〒 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ()		
				☎ ()

【保証規定】

1.保証期間内(お買い上げの日より1年間)に、正常な使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。

2.次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。

- (a) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障及び損傷
- (b) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障及び損傷
- (c) 火災、煙害、異常電圧及び地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障
- (d) 保証書のご提示がない場合
- (e) 本保証書の保証期間及び販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合

3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

● This warranty is valid only in Japan.

4.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本 社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	東京営業部	☎(03) 3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11		☎(011) 271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3		☎(022) 239-5211 (代)
さいたま支店	〒338-0001	さいたま市中央区上落合9丁目4番7号		☎(048) 852-0707 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間1715番地1		☎(042) 795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号		☎(052) 963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号		☎(06) 6443-8791 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号		☎(082) 293-1311 (代)
高松支店	〒761-8031	高松市郷東町223番1		☎(087) 881-8800 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号		☎(092) 461-1131 (代)